

GUÍA RÁPIDA PARA LAS PRUEBAS


El Medidor DEX® 2 de Ascensia™
usa Tiras de Prueba
AUTODISC™ de Ascensia™



PARA MONTAR EL DISCO DE 10 PRUEBAS


1.

Abra el medidor,
soltando el
pasador ubicado
en el extremo.

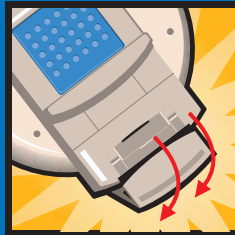


2.

Inserte el disco con
la parte
protuberante hacia
arriba y alinee la
flecha amarilla que
aparece en el disco,
con la flecha amarilla
que está en el
medidor.

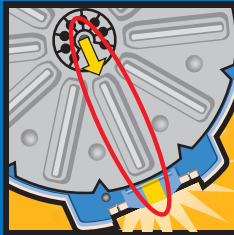

3.

Presione
suavemente el
disco, para que
quede en su lugar,
debajo de las dos
lengüetas azules.

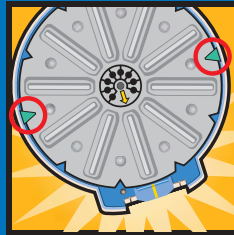

4.

Cierre el medidor
y ajuste el pasador
ubicado en el
extremo. Con esto,
el medidor ya
queda codificado y
listo para usar.



Ascensia™
DEX²
Sistema de cuidado
de la diabetes


Ascensia
DEX²
Sistema de cuidado
de la diabetes

PARA HACERSE LA PRUEBA DE GLUCOSA EN SANGRE

GUÍA RÁPIDA PARA LAS PRUEBAS


1.

Mueva la lengüeta hacia la izquierda, mientras la desliza hacia delante. Cuando la lengüeta llega al tope, aparece la tira de prueba y la pantalla muestra una gota que se ilumina en forma intermitente.

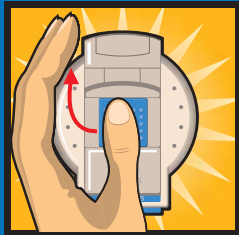

2.

Coloque un dedo, con una gota de sangre, en posición estable y acerque el dedo hasta que todo el borde de la tira de prueba toque la superficie de la gota y déjelo así hasta que escuche una señal. La diferencia es que la gota de sangre queda imbuída dentro de la tira de prueba, en lugar de quedar encima.

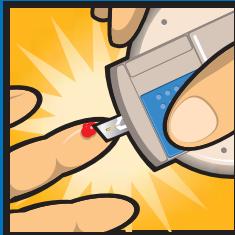


3.

En 30 segundos podrá leer los resultados.



4.

Mueva la lengüeta de nuevo a su lugar, colocando el medidor hacia abajo, con el borde apuntando hacia el cesto de basura (por favor, evite tocar el botón azul). La tira de prueba debe salir sola y luego se debe desechar. El medidor se apaga.

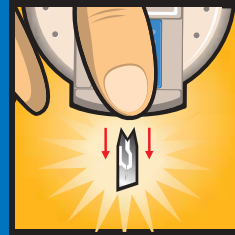

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Por favor, si desea mayor información acerca de las instrucciones de operación, refiérase a la guía del usuario del DEX² de AscensiaTM. Cuando necesite asistencia persona, el Servicio al Cliente de Bayer se lo puede brindar, con sólo llamar al **1-800-348-8100**.

© 2003 Bayer HealthCare LLC, División de Diagnóstico
www.ascensia.com
www.bayercaresdiabetes.com
www.ascensiadreamfund.com
0391350 Rev. 3/03



Bayer HealthCare